

품목신고번호	서울수신 12-2194호
품목명	치과용회전연마기
모델명	제조사표시사항참조
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층 (문정동)
제조사(제조국)	Edenta AG (스위스)
제조의뢰자(제조의뢰국)	Degudent GmbH (독일)
사용목적	회전운동을 이용하여 연마하는 기기
중량 또는 포장단위	제조원 포장단위에 의함
사용방법 1. 사용 전 준비사항 -치과기공용 핸드피스에 치과용 회전 연마기를 연결 시 정확하게 연결되었는지 확인한다. 느슨하게 연결되었거나 연장하여 연결했을 경우 상처를 입을 수 있다. 2. 사용방법 -알맞은 size의 절삭기구를 치과용 회전 연마기에 안전하게 연결한 후 연마하고자 하는 부위를 천천히 기구에 대고 연마한다. -연마기로 연마를 한 후, 필요한 경우에는 Polishing Wheel을 사용하여 보철물에 광택을 낸다. 3. 사용 후 보관 및 관리방법 -사용된 연마기는 광택용 브러쉬로 깨끗이 청소한 후 습기가 없는 건조한 장소에 보관한다.	
사용 시 주의사항 -연마기를 사용하기 전에 반드시 보호안경과 마스크를 착용해야 한다. -사용된 연마기의 날이 손상되지 않도록 연마기를 사용한 후에는 최초 포장용기 안에 세워서 안전하게 보관한다.	
첨부분서의 작성 및 개정연월	2024.10
보관 또는 저장방법	-사용된 연마제는 재사용하지 말고 폐기한다. -습기가 없는 장소에서 보관한다.
제조번호	제조사 표시사항 참조
제조연월	제조사 표시사항 참조
부작용 보고 관련 문의처	한국의료기기안전정보원, 080-080-4183
본 제품은 일회용 의료기기이므로 재사용금지	