

품목신고번호	서울수신 12-224호
품목명	치과주조용왁스
모델명	제조사표시사항참조
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층 (문정동)
제조원(제조국)	DeguDent GmbH (독일)
사용목적	로스트왁스법에 의한 고정식 보철 수복물의 납형 제작용 캐스팅 왁스
중량 또는 포장단위	EA
사용방법 1. 사용 전 준비사항 -제품의 외관 파손, 불순물 포함여부를 확인한다. 2. 사용방법 -Cercon brain expert 장비에 장착한 후 on 버튼을 눌러 Type 2 Cercon brain expert cutter(PMMA)로 왁스를 밀링한다. -제작된 납형을 주조기에 넣어 열을 가하면 왁스가 녹아내리고 왁스가 녹아서 생긴 빈 공간을 합금을 넣어 보철물을 완성한다.(로스트왁스법) 3. 사용 후 보관 및 관리방법 -제품을 오염시킬 수 있는 먼지가 있거나 지저분한 곳에서 개봉상태로 보관해서는 안 된다. -고온, 직사광선 및 습기가 있는 곳을 피하여 보관한다.	
사용 시 주의사항 -작업 중에는 보호안경 및 마스크를 착용해야 한다. -피부점막에 접촉을 피해야 한다. -사용 후 손은 깨끗이 닦고 핸드크림을 바른다. -사용 중 발생하는 먼지 등을 흡입하면 안 된다. -사용 중 먼지흡입기를 사용해야 한다.	
첨부분서의 작성 및 개정연월	2024.10
보관 또는 저장방법	고온, 직사광선 및 습기가 있는 곳을 피하여 보관한다.
제조번호	LOT번호 참조
제조연월, 사용기한	제조사 표시사항 참조
부작용 보고 관련 문의처	한국의료기기안전정보원, 080-080-4183
본 제품은 일회용 의료기기이므로 재사용금지	