

품목신고번호	서울수신 14-1657호
품목명	컨디셔너
모델명	606.07.030
수입업자	덴츠플라이코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동)
제조원(제조국)	Dentsply DeTrey GmbH (독일)
사용목적	상아질의 스미어층을 제거 또는 처치하기 위하여 사용하는 산성 물질
중량 또는 포장단위	제조원의 포장단위에 의함
<b>사용방법</b> 1. 사용 전 준비사항 제품의 유효기간과 포장상태를 확인한다. 2. 사용방법 시멘트를 수복하기 전, 본 제품을 와동 표면에 적용하고 15초간 그대로 둔 후 씻어낸다. 3. 사용 후 보관 및 관리방법 사용 후 뚜껑을 꼭 닫은 상태로 10-24°C의 직사광선이 닿지 않는 건조한 곳에서 보관한다.	
<b>사용 시 주의사항</b> 1. 직사광선을 피하여 10-24°C에서 보관한다. 2. 치과용으로만 사용한다. 3. 유효기간: 3년	
첨부분서의 작성 및 개정연월	2024.10
보관 또는 저장방법	직사광선을 피하여 10-24°C에서 보관한다.
제조번호	LOT번호 참조
제조연월, 사용기한	제조자 표시사항 참조
부작용 보고 관련 문의처	한국의료기기안전정보원, 080-080-4183
<b>본 제품은 의료기기임</b>	