

품목신고번호	서울수신 14-2273 호
품목명	치과용고무방습기
모델명	제조사표시사항참조
수입업자	덴츠플라이코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7 층(문정동)
제조의뢰자(제조의뢰국)	Maillefer Instruments Holding Sarl (스위스)
제조사(제조국)	Dentsply Limited (영국) / Four D Rubber Co Ltd (영국)
사용목적	치과 시술 시 구강 내의 수술영역을 격리하기 위하여 펀치로 구멍을 뚫어 치아에 씌우는 시트
중량 또는 포장단위	제조원의 포장단위에 의함
사용방법 가. 사용 전 준비사항 제품의 유효기간과 포장상태를 확인한다. 클램프, 포셉, 프레임, 펀치는 사용 전 소독한다. (멸균온도: 134°C) 나. 사용방법 치과 시술 시 구강 내의 수술영역을 격리하기 위하여 펀치로 러버댐을 뚫은 후 치아에 씌운다. 다. 사용 후 보관 및 관리방법 러버댐은 일회용이므로 사용 후 폐기한다.	
사용 시 주의사항 러버댐은 라텍스 성분으로 이루어져 있으므로 라텍스에 알레르기가 있는 환자에게는 사용하지 않는다. 러버댐은 일회용이며 재사용하지 않는다.	
첨부분서의 작성 및 개정연월	2024.10
보관 또는 저장방법	25°C 이하에서 보관한다.
유효기간	60 개월
제조번호	제조사 표시사항 참조
제조연월,사용기한	제조사 표시사항 참조
부작용 보고 관련 문의처	한국의료기기안전정보원, 080-080-4183
본 제품은 의료기기임. 러버댐은 일회용이므로 재사용금지.	