

품목신고번호	수신 98-358 호
품목명	치과용연마제
모델명	제조사표시사항참조
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7 층 (문정동)
제조원(제조국)	DENTSPLY Caulk (미국)
사용목적	치아착색 제거용
중량 또는 포장단위	170g/Tube
<b>사용방법</b> 가. 사용 전 준비사항 구강 안과 치아를 에어/워터 시린지로 청소한다. 나. 사용방법 치과용 핸드피스에 폴리싱 컵을 장착한 후 컵의 윗면에 적정량의 페이스트를 도포한 후 핸드피스의 회전력을 이용하여 착색을 제거한다. 다. 사용 후 보관방법 사용 후 뚜껑을 꼭 덮는다. 상온에서 보관한다.	
<b>사용 시 주의사항</b> 유효기간: 제조일로부터 3 년 저장방법: 상온에서 보관한다.	
첨부분서의 작성 및 개정연월	2024.10
보관 또는 저장방법	상온에서 보관한다.
유효기간	제조일로부터 3 년
제조번호	LOT 번호 참조
제조연월	제조사 표시사항 참조
부작용 보고 관련 문의처	한국의료기기안전정보원, 080-080-4183
<b>본 제품은 의료기기임</b>	