

품목신고번호	서울수신 98-721호
품목명	치과용매물재
모델명	Multi-Vest Investments and Liquid
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동)
제조사(제조국)	DENTSPLY Trubyte (미국)
제조의뢰자(제조의뢰국)	DENTSPLY International Inc. Prosthetics Division (미국)
사용목적	주조체를 만들기 위하여 용융된 금속이 주입되는 주형을 만든다.
중량 또는 포장단위	제조원의 포장단위에 의함
사용방법 1) 사용 전 준비사항 왁스패턴과 알맞은 크기의 주조 링을 준비 한다. 2) 사용 방법 (1) 정확한 혼수비(파우더: 액=100g:12ml)로 혼합한다. (2) 혼합 후 기포를 진동기 등으로 최소화한다. (3) 패턴에 일차로 붓으로 얇게 도포한다. (4) 링을 진동기 위에 올려놓고 진동을 주면서 매물재를 링 안으로 흘러 넣는다. (5) 링밖으로 넘치지 않을 정도로 매물재를 부은 후 경화시킨다. 3) 사용 후 보관 및 관리 방법 뚜껑을 잘 닫은 후 상온의 건조한 곳에서 보관한다.	
사용 시 주의사항 분진을 흡입하지 않도록 주의한다.	
첨부분서의 작성 및 개정연월	2024.10
보관 또는 저장방법	뚜껑을 잘 닫은 후 상온의 건조한 곳에서 보관한다.
유효기간	제조일로부터 5년
제조번호	LOT번호 참조
제조연월, 사용기한	제조사 표시사항 참조
부작용 보고 관련 문의처	한국의료기기안전정보원, 080-080-4183
본 제품은 의료기기임	